


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ

Εάν ένα θύμα υποστεί πνιγμονή ξεκινήστε:




5 Χτυπήματα στην Πλάτη

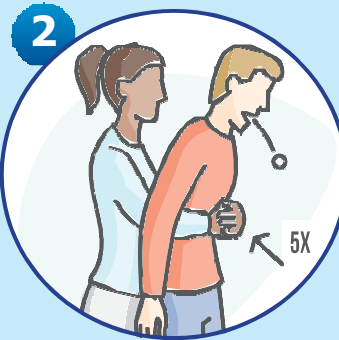


5 Κοιλιακές Ωθήσεις




Επαναλάβετε εωσότου αφαιρεθεί το ξένο σώμα. Εάν το θύμα χάσει τις αισθήσεις του **τηλεφωνήστε στο 112 για βοήθεια**. Μετά χρησιμοποιήστε την συσκευή **LifeVac**.

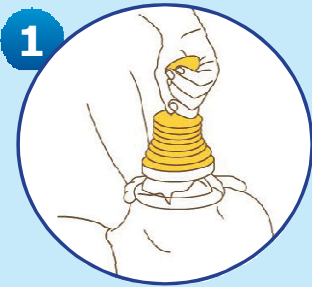

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
πάνω από την
μύτη και το στόμα

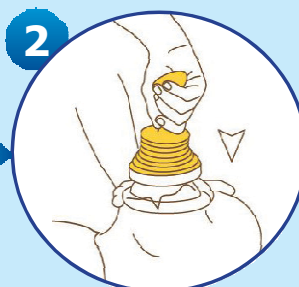

ΠΙΕΣΤΕ
προς τα κάτω την
λαβή/φουσητήρα

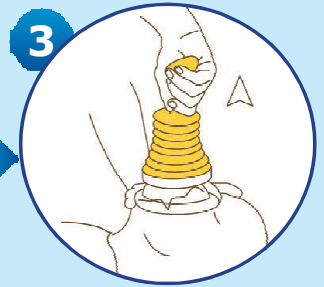

ΤΡΑΒΗΞΤΕ
την λαβή

Επαναλάβετε εωσότου αφαιρεθεί το ξένο σώμα, ή έως 5 φορές. Αν το ξένο σώμα δεν έχει αφαιρεθεί, **ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ**.

LifeVac Europe Ltd, Carnanton,
King Street, Combe Martin, Devon EX34 0AD

www.lifevac.eu

Telephone 07599 210 161



LIFEVAC EUROPE LTD