




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ

Εαν ένα θύμα υποστεί πνιγμονή

- 1 Ενθαρρύνετε το θύμα να βήξει.
- 2 Αν ο βήχας δεν είναι αποτελεσματικός δώστε 5 χτυπήματα στην πλάτη
- 3 Αν η απόφραξη δεν καθαριστεί, κάντε 5 κοιλιακές ωθήσεις

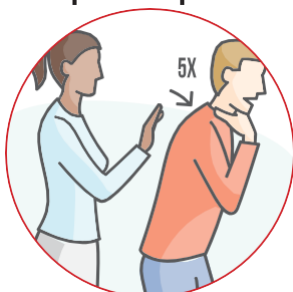

Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρι να απομακρυνθεί το ξένο σώμα, ή το θύμα χάσει τις αισθήσεις του

Αν το θύμα χάσει τις αισθήσεις του, ή τα βήματα 2 και 3 δεν μπορούν να εφαρμοστούν, καλέστε το 166 ή 112 και χρησιμοποιήστε τη συσκευή LifeVac.

4




Τοποθετήστε την πάνω από στόμα και μύτη, εφαρμόζοντας καλά, με τη σωστή σε μέγεθος μάσκα

Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή/φουσητήρα

Τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή απότομα

Τοποθετήστε • Πιέστε • Τραβήξτε

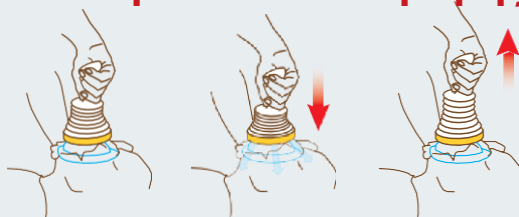

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ Ή ΕΩΣ 5 ΦΟΡΕΣ

Αν δεν αφαιρεθεί το ξένο σώμα, ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ

LifeVac South Europe by EKYZ,

www.lifevac.life

Telephone 0030 2310 421551

Rev.3. Date 11.2.19

